

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU PM-6000D

1. Włóż kabel zasilający do gniazdka.
2. Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu, w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł pola magnetycznego wytwarzanego przez inne urządzenia.
3. Załóż mankiety na ciało. Mankiety zakładamy na osłonki higieniczne lub na miękkie, cienkie, bawełniane ubranie. Nie należy wykonywać zabiegów na gołej skórze, ponieważ grozi to przycięciem skóry suwakiem i jest niehigieniczne.
4. Włącz urządzenie przyciskiem WŁĄCZ / WYŁĄCZ. Gdy urządzenie jest włączone to przycisk podświetla się na zielono.
5. Podłącz przewód gumowy mankietu do urządzenia. Strzałki umieszczone na wtyczce powinny być widoczne od góry i wskazywać w kierunku urządzenia.
6. Włącz urządzenie - na panelu podświetlą się ikony.
7. Wybierz jeden z programów
8. Ustaw odpowiednie ciśnienie
9. Dostosuj czas zabiegu
10. Nigdy **nie rozpinaj** mankietów w czasie pracy urządzenia ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
11. Po zakończonym zabiegu **ZAWSZE** wyłączaj urządzenie przyciskiem WŁĄCZ / WYŁĄCZ.

W razie, gdyby mankiet był zbyt długi, można odłączyć komorę nr 6 wciskając jej oznaczenie numeryczne.